



LAMPA URZĄDZENIE PDT PULSLIGHT

9900 zł brutto



Przejdź na stronę produktu

CZYM JEST TERAPIA FOTODYNAMICZNA

Terapia fotodynamiczna lepiej znana jest jako „światło magiczne”. To nowa technika stosowana w celu poprawy wyglądu skóry. Polega na zastosowaniu fotonów świetlnych LED, które w zależności od zabiegu stymulują warstwy skóry o różnym natężeniu i kolorze.

KOLORY

- * Czerwony (630nm-635nm)
- * Niebieski (460nm-470nm)
- * Żółty (580nm-590nm)
- * Czerwony + Niebieski
- * Niebieski + Żółty

- * Czerwony + Żółty
- * Mix kolorów.

ZASTOSOWANIE

Terapia fotodynamiczna przeznaczona jest do zabiegów na twarz i skórę głowy. Stosuje się do wszystkich rodzajów skóry. Nie ma zastosowania pulsacyjnego światła czy lasera. Jego praca opiera się na niskiej emisji, więc nie należy do inwazyjnych metod. Proces zastosowania jest bardzo prosty, komfortowy i skuteczny.

LICZBA SESJI ORAZ CZAS PRACY

Aby otrzymać najlepsze efekty zaleca się 14-24 sesji zabiegów w okresie 3-6 miesięcy. Każda sesja trwa 20-30 minut. Można stosować 1-2 sesje tygodniowo.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA LED W TERAPII ANTI-AGING

PROBLEM

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CZAS TRWANIA

TERAPII

DZIAŁANIE

ZMARSZCZKI

2-3 sesje/tydzień

4-6 tygodni

Produkcja elastyny i kolagenu, aktywacja fibroblastów

BLIZNOWCE

Zmienna w zależności od zaleceń lekarza

4-6 tygodni

Odbudowa nabłonka i skóry właściwej, podwyższenie odporności, działanie przeciwbólowe

POROST WŁOSÓW

2-3 sesje/ tydzień

Zmienny w zależności od zaleceń lekarza

Poprawa ukrwienia skóry głowy

ROGOWACENIE

2-3 sesje/ tydzień

Zmienny w zależności od zaleceń lekarza

Redukcja zapalenia

ROZSTĘPY

2-3 sesje / tydzień

4-5 tygodni

Produkcja kolagenu i elastyny, stymulacja produkcji melaniny

RUMIEŃ

3 sesje/ tydzień

6 sesji

Redukcja zapalenia

ENERGIA MIERZONA W (J/CM2) W ODLEGŁOŚCI 40 CM OD OBSZARU ZABIEGOWEGO
POZIOM

ENERGIA/CM2

1

10 J/cm2

2

20 J/cm2

3

30 J/cm2

4

40 J/cm2

5


50 J/cm2

CZERWONY (630NM-635NM),

NIEBIESKI (460NM-470NM),

ŻÓŁTY (580NM-590NM),

Moc światła	1-10 poziomów Maks. 120 mW / LED
Częstotliwość	0-110 Hz (0 oznacza tryb ciągły)
Czas	1-60 minut
Powierzchnia zabiegowa	50 cm x 20 cm
Typ LED	Dioda LED 5050 SMD
Ilość diod LED	1420 szt.
Waga	15 kg
Wymiary	70 cm x 45 cm x 142 cm
Rozmiar paczki	92 cm x 52 cm x 32 cm

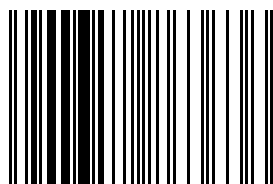

5904358863636